

**ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS**

- 1- Após a coleta do material (realizado por médico), este deve ser acondicionado em frasco individual, contendo líquido fixador (formol a 10%, em volume ideal: 10 volumes de formol para um volume do tecido-de maneira que a peça fique totalmente submersa);
- 2- Identificar o frasco com o nome do paciente e o material a ser examinado;
- 3- Enviar a amostra juntamente com a requisição de exame assinada pelo médico assistente, com as informações clínicas e de identificação pertinentes;
- 4- Conservar o material e a requisição em local destinado ao recolhimento pelo laboratório